

Upute za uporabu Lubrikant Satisfyer Men – Warming

Lubrikanti Satisfyer Men

Lubrikanti Satisfyer Men su medicinski proizvodi za primjenu na koži. Njihova receptura ne sadrži ulja i masti, a odlikuju ih odabrane sirovine, kontrolirani proces proizvodnje kao i opsežna ispitivanja. Testiranja lubrikanata na toleranciju na koži i sluznici su pozitivna, a postoji i dokazana tolerancija kondoma na lubrikante.

Svi lubrikanti serije Satisfyer Men ispunjavaju stroge zahtjeve europske

„Direktive 93 / 42 EEZ o medicinskim proizvodima“ i njemačkog „Zakona o medicinskim proizvodima“.

Lubrikanti Satisfyer Men su na bazi vode. To znači da ih sve vrlo jednostavno i bez ikakvih ostataka može oprati vodom, a na koži ne stvaraju nikakav ljepljiv osjećaj. Idealno su usklađeni sa korištenje sa svim proizvodima Satisfyer Men, ali se mogu koristiti i sa svim drugim igračkama ili tijekom spolnog odnosa.

Kako djeluju lubrikanti

Primjena lubrikanata s tvojim proizvodom Satisfyer Men izuzetno je jednostavna. Oni djeluju kao sredstvo za podmazivanje koje ti omogućava brzo prodiranje u mekanu ovojnicu i uživanje u korištenju tvoje igrčke. Lubrikant brine o realnom osjećaju i intenzivnoj sposobnosti klizanja. Pri tome njegova receptura bez boje i okusa omogućava prirodno uživanje.



Primjena lubrikanata Satisfyer Men

Praktična bočica omogućava ti lagano doziranje. Nanesi lubrikant veličine kikirikija na svoj penis, a malo na svoju igrčku. Raspodijeli lubrikant ravnomjerno po svom ukrućenom penisu i lagano uklizi u masturbator.

Prilikom spolnog odnosa isto tako nanijeti dovoljno lubrikanta na penis ili na kondom koji je navučen na ukrućeni penis kao i na dio tijela partnera i raspodijeliti ga prstima. Preporuča se da se prije i posije korištenja temeljito operu ruke.

U slučaju korištenja kondoma obavezatno se pridržavati napomena u uputama za korištenje kondoma.



Uklanjanje lubrikanata Satisfyer Men

Lubrikanti iz serije Satisfyer Men mogu se oprati vodom bez ikakvih ostataka, neovisno o tome jesu li na koži, sluznici ili na tvojoj igrčki. Iz higijenskih razloga svoju igrčku trebaš očistiti prije i poslije svake uporabe. Za tu je svrhu idealan dezinfekcijski sprej Satisfyer Men.

Ostale napomene o korištenju tijekom spolnog odnosa

Sprječavanje trudnoće i zaštita od infekcija

Lubrikanti Satisfyer Men nisu sredstva za sprječavanje trudnoće, ne sadrže spermicidne tvari i ne pružaju nikakvu zaštitu od infekcija.

Želja za djecom

Ginekolozi preporučaju da u slučaju da želite zatrudnjeti, lubrikante koristite štedljivo ili da ih zbog sigurnosti u potpunosti izbjegavate, jer oni mogu otežati začeće.

Ostale napomene u slučaju netolerancije

U slučaju pretraživanja glede netolerancije, npr. tvari koje izazivaju alergije, treba se prije primjene upoznati s informacijama navedenim u označavanje proizvoda pod „Ingredients (INCI)“ (sastojci). Ako bi došlo do iritacije kože, molimo vas da uklonite proizvod kako je opisano i da po potrebi konzultirate liječnika.



Sastojci:

glicerín, voda, hidroksietil celuloza, natrijev laktat, natrijev benzoat, alantoin, mliječna kiselina

Proizvođač



Amor-Gummiwaren GmbH
August-Rost-Str. 4
99310 Arndtstadt, Germany



CE 0197