

## Návod k použití Lubrikant Satisfyer Men – Warming

### Lubrikanty Satisfyer Men

Lubrikanty Satisfyer Men jsou zdravotnické prostředky určené k aplikaci na pokožku. Mají recepturu bez olejů a tuků a vyznačují se vybranými surovinami, kontrolovanými výrobními postupy a přísným testováním. Při testu lubrikantů na snášenlivost s pokožku a sliznicí byly zaznamenány pozitivní výsledky a lubrikanty jsou prokazatelně kompatibilní s kondomy.

Všechny lubrikanty z řady Satisfyer Men splňují přísné požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích a německého zákona o zdravotnických prostředcích.

Lubrikanty Satisfyer Men jsou na bázi vody. To znamená, že jsou snadno a beze zbytků omyvatelné vodou a nezanechávají lepavý pocit na pokožce. Jsou speciálně uzpůsobené pro použití se všemi výrobky Satisfyer Men, lze je však použít také s ostatními pomůckami nebo při pohlavním styku.

### Jak lubrikanty účinkují

Tyto lubrikanty ti zaručí snadné a hladké použití tvého Satisfyeru Men. Fungují jako mazivo, které ti umožní rychle vniknout do měkkého pouzdra a naplno si vychutnat použití v kombinaci s tvou oblíbenou pomůckou. Lubrikant ti zajistí realistický pocit a intenzivní lubrikaci. Jeho barevně a chufově neutrální receptura je přitom zárukou přirozeného požitku.



### Použití lubrikantů Satisfyer Men

Praktická lahvička umožňuje snadné dávkování. Nanes množství lubrikantu odpovídající velikosti burského oříšku na svůj penis a trochu také na pomůcku. Rozetř lubrikant rovnoměrně na ztopořený penis a vklouzni jemně do masturbátoru. Také při pohlavním styku nanes dostatečné množství lubrikantu na penis nebo na nasazený kondom i na intimní partii partnera a rozetř prsty. Doporučuje se umýt si před a po použití důkladně ruce. Při použití kondomu se bezpodmínečně řiď pokyny uvedenými v návodu k použití kondomu.



### Odstranění lubrikantů Satisfyer Men

Lubrikanty z řady Satisfyer Men můžeš beze zbytků odstranit vodou, ať už přímo z pokožky a sliznic, nebo z pomůcky. Z hygienických důvodů doporučujeme pomůcku vyčistit před a po každém použití. K tomu se nejlépe hodí přípravek Satisfyer Men Disinfectant Spray.

### Další informace o použití při pohlavním styku Antikoncepce a ochrana před infekcemi

U lubrikantů Satisfyer Men se nejedná o antikoncepční prostředky, lubrikanty neobsahují žádné spermicidní látky a neposkytují žádnou ochranu proti infekcím.

### Při plánovaném početí

Gynekologové doporučují při touze po dětech používat lubrikanty jen v omezené míře nebo je pro jistotu nepoužívat vůbec, neboť mohou zkomplikovat početí.

### Další informace pro případy nesnášenlivosti

Při zjišťování nesnášenlivostí, např. alergenů, doporučujeme před použitím zkontrolovat etiketu výrobku, konkrétně oddíl „Ingredients (INCI)“. Pokud se objeví podráždění pokožky, odstraň produkt podle uvedených pokynů a případně se porad s lékařem.



### Obsažené látky

Glycerin, voda, hydroxyethylcelulóza, mléčnan sodný, benzoát sodný, allantoin, kyselina mléčná



### Výrobce

Amor-Gummiwaren GmbH  
August-Rost-Str. 4  
99310 Arndtstadt, Německo



CE 0197