

Használati utasítás Satisfyer Men – Warming síkosítószer

A Satisfyer Men síkosítószer

A Satisfyer Men síkosítószeres gyógyászati, bőrön történő alkalmazásra való termékek. Olaj- és zsírmentes receptúra, és meggyőző válogatott nyersanyagokkal, ellenőrzött gyártási folyamatokkal és az átfogó teszteléssel. A síkosítószeres vizsgálatok pozitív eredményű bőr- és nyálkahártya-kompatibilitás szempontjából, és bizonyítottan óvszer-kompatibilitást mutat. A Satisfyer Men sorozat minden síkosítószeres megfelel az európai "Orvostechikail eszközökről szóló 93/42 irányelv" és a német "Orvosi műszerek törvény" szigorú követelményeinek. A Satisfyer Men síkosítószeres vízbázisúak. Ez azt jelenti, hogy vízzel egyszerűen és maradéktalanul lemosható, nem okoz ragadós érzetet a bőrön. Ideális módon alkalmas minden Satisfyer Men termékhez, de minden játékhoz vagy szexuális együttéléshez is használható.

Így működnek a síkosítószeres

A síkosítószeres egyszerűvé és zavartalaná teszik a használatot a Satisfyer Men-ekkel. Úgy hatnak, mint egy kenőanyag, amely lehetővé teszi, hogy gyorsan behatoljon a puha burkolatba a játék használatának élvezete érdekében. A síkosítószeres valószínű érzetet és intenzív csúszóképességet biztosít. A szintelen és íztelen receptúra természetes élvezetet tesz lehetővé.



A Satisfyer Men síkosítószer alkalmazása

A praktikus flakon könnyű adagolást tesz lehetővé számodra. Helyezz fel mogyorónyi síkosítószeret a péniszre, és egy kevés síkosítószeret a játékodra. Oszlasd el a síkosítószeret egyenletesen a merev péniszeden, és óvatosan csúsztasd bele a maszturbátorba.

Nemi közösülés során szintén elegendő síkosítószeret kell felvinni a péniszre, vagy a merev péniszre helyezett óvszerre, és a partner testrézére, és az ujjakkal el kell osztani azt. Javasoljuk, hogy használat előtt és után alaposan mosson kezet. Az óvszer használatakor elengedhetetlen az óvszer használati utasításában szereplő utasítások betartása.



A Satisfyer Men síkosítószer eltávolítása

A Satisfyer Men sorozat síkosítószeres vízzel maradéktalanul lemoshatók, függetlenül attól, hogy bőrből, nyálkahártyából vagy a játékból származik-e. Higiénikus okokból tisztítsd meg a játékodat minden használat előtt és után. A Satisfyer Men Disinfectant Spray (fertőtlenítő spray) tökéletesen alkalmas erre.

Egyéb tanácsok a nemi közösülés során történő használathoz

Fogamzásgátlás és fertőzés elleni védelem

A Satisfyer Men síkosítószeres nem fogamzásgátlók, nem tartalmaznak sperma-semlegesítő hatóanyagokat, és nem biztosítanak fertőzésvédelmet.

Gyermekvállalás esetén

Nőgyógyászok azt javasolják, hogy ha gyermeket szeretnénk, akkor csak takarékosan használjuk a síkosítószereseket a biztonság érdekében, mivel azok megnehezíthetik a fogantatást.

Összeférhetlenséggel kapcsolatos egyéb információk

Összeférhetlenség, pl. allergiát okozó anyagok keresésekor, használat előtt tájékozódni kell az „Ingredients (INCI)” termékmegjelölésből. Ha bőrirritációk lépnek fel, kérjük, távolítsa el a terméket a leírtak szerint, és ha adott esetben forduljon orvoshoz.



Összetevők

Glicerín, víz, hidroxietil-cellulóz, nátrium-laktát, nátrium-benzoát, allantoin, tejsav

Gyártó



Amor-Gummiwaren GmbH
August-Rost-Str. 4
99310 Arndtstadt, Germany



CE 0197