

## Struzzjonijiet għall-użu Lubrikant Satisfyer Men – Neutral

### Il-lubrikanti Satisfyer Men

Il-lubrikanti Satisfyer Men huma prodotti mediċinali għall-użu kutanju. Dawn għandhom riċetta mingħajr żjut jew xaħmijiet u jimpressionaw bil-kwalità għolja tagħhom – riżultat ta' materja prima magħżula, proċessi ta' manifattura kkontrollati u testijiet estensivi. Dawn il-lubrikanti ġew ittestjati b'riżultati pożittivi fuq il-ġilda u l-membrani mukużi u huma ċċertifikati għall-użu ma' kondoms.

Il-lubrikanti kollha tas-serje Satisfyer Men jilhqg r-reqwiżiti għolja tad-

"Direttiva tal-Kunsill 93/42/KEE dwar mezz medici" u l-"Medizinproduktegesetz" (Ligi Ġermaniza dwar il-mezz medici).

Il-lubrikanti Satisfyer Men għandhom bażi ta' ilma. Dan ifisser li jistgħu jinħaslu faċilment bl-ilma mingħajr ma jhallu residwi u ma johlqox sensazzjoni ta' twaħħil fuq il-ġilda. Huma ideali għall-użu mal-prodotti Satisfyer Men kollha u jistgħu saħansitra jintużaw ma' toys oħra jew waqt is-sess.

### Hekk jaħdmu l-lubrikanti

Il-lubrikanti jiffaċilitaw l-użu tas-Satisfyer Men tiegħek u jnaqqsu l-frizzjoni. Huma jaġixxu bħala griż li jgħinek tippenetra malajr fl-isleeve ratba sabiex tiegħu gost bit-toy tiegħek. Il-lubrikant jaġhtik sensazzjoni realistika u għandu kapacità intensiva ta' zlieq. Il-formulazzjoni bla kulur u bla toġma tiegħu tippermetti tgawdija naturali.



### Kif tapplika l-lubrikant Satisfyer Men

Il-flixkun żgħir u prattiku jippermettilek dożaġġ faċli. Applika ammont daqs karawetta fuq il-pene u ftit ieħor lubrikant fuq it-toy tiegħek. Ifrex sew il-lubrikant fuq il-pene mqajjem tiegħek u deffsu bil-moġħod fil-masturbatur.

Għas-sess, applika wkoll ammont suffiċjenti ta' lubrikant fuq il-pene jew fuq il-kondom milbus fuq il-pene mqajjem u fuq il-parti tal-partner u ifirxu b'subgħajk. Nirrakkomandaw li taħsel sew idejk qabel u wara l-użu.

Meta tuża l-prodott ma' kondom, dejjem segwi n-noti u l-istruzzjonijiet għall-użu li jiġu mal-kondom.



### Kif tneħhi l-lubrikant Satisfyer Men

Il-lubrikanti tas-serje Satisfyer Men jistgħu jinħaslu bl-ilma, sew minn fuq il-ġilda jew membrani mukużi u sew mit-toy tiegħek, mingħajr ma jhallu residwi. Għal raġunijiet iġjenici, għandek tnaddaf it-toy tiegħek qabel u wara kull użu. Dan tista' tagħmlu faċilment bis-Satisfyer Men Disinfectant Spray.

### Aktar informazzjoni għall-użu waqt is-sess

#### Kontraċezzjoni u protezzjoni minn infezzjonijiet

Il-lubrikanti Satisfyer Men mhumiex kontraċettivi, ma fihom ebda spermicidi u ma joffru protezzjoni kontra infezzjonijiet.

### Jekk qegħdin tipprowaw għat-tfal

Jekk qegħdin tipprowaw għat-tfal, il-ginekologjisti jirrakkomandaw li tużaw kemmxejn jew xejn affattu mill-prodott, għaliex dan jista' ifixkel il-konċepiment.

### Aktar informazzjoni dwar inkompatibbiltajiet

Għal inkompatibbiltajiet, bħal sustanzi li jikkawżaw allergiji, fittex l-informazzjoni taħt "Ingredients (INCI):" fit-tikketta tal-prodott qabel l-użu. F'każ ta' irritazzjonijiet tal-ġilda, jekk jogħġbok neħhi l-prodott kif avżat u kkonsulta tabib(a) jekk ikun hemm bżonn.



### Ingredjenti

Ilma, glicerina, Hydroxyethylcellulose, phenoxyethanol, allantoin, acidu benzojku

### Manifattur



Amor-Gummiwaren GmbH  
August-Rost-Str. 4  
99310 Arndtstadt, Germany



CE 0197