

Satisfyer

Használati utasítás Satisfyer – Gentle Warming síkosítószer

A Satisfyer síkosítószer

A Satisfyer síkosítószer a bőrön történő alkalmazásra való termékek. Olaj- és zsírmentes receptúra, kiváló síkosító tulajdonságokkal, hosszú távú hatással rendelkeznek.

A Satisfyer síkosítószer vízbázisú. Ez azt jelenti, hogy vízzel egyszerűen és maradéktalanul lemosható, nem okoz ragadós érzetet a bőrön. Ideális módon alkalmas minden Satisfyer termékhez, de minden egyéb játékhoz vagy szexuális együttlélhez is használható.

Így működnek a síkosítószer

A síkosítószer egyszerűvé és zavartalaná teszi a használatot a Satisfyerrel. A szilikon-rátát finoman csúszik az intim részeiden, így ideális pozicionálást tesz lehetővé számokra a maximális élvezet érdekében. A szintelen, íztelen és szagtalan receptúrának köszönhetően semmi nem fogja elterelni a figyelmedet a legfontosabból és teljes mértékben koncentrálni a végkifejletre.



A Satisfyer síkosítószer alkalmazása

A praktikus flakon könnyű adagolást tesz lehetővé számokra. Cseppents egy kevés síkosítószer a csiklóra, és egy keveset a Satisfyer szilikonrátára is. Oszlasd el a síkosítószer a kívánt testrészekben.

Nemi közösülés során szintén elegendő síkosítószer kell felvinni a testrészekre, vagy a merev péniszre helyezett óvszerre, és az ujjakkal el kell oszlatni azt. Javasoljuk, hogy használat előtt és után alaposan mosson kezet.

Az óvszer használatkor elengedhetetlen az óvszer használati utasításában szereplő utasítások betartása.



A Satisfyer síkosítószer alkalmazása

A Satisfyer sorozat síkosítószeri vízzel maradéktalanul lemoshatók, függetlenül attól, hogy bőrből, nyálkahártyából vagy a játékból származik-e. Higiénikus okokból tisztítsd meg a játékodat minden használat előtt és után. A Satisfyer Disinfectant Spray (fertőtlenítő spray) tökéletesen alkalmas erre.

Egyéb tanácsok a nemi közösülés során történő használatához Fogamzásgátlás és fertőzés elleni védelem

A Satisfyer síkosítószer nem fogamzásgátló, nem tartalmaznak sperma-semlegesítő hatóanyagokat, és nem biztosítanak fertőzésvédelmet.

Gyermekvállalás esetén

A nőgyógyászok azt javasolják, hogy ha gyermeket szeretnénk, akkor csak takarékosan használjuk a síkosítószeret a biztonság érdekében, mivel azok megnehezíthetik a fogantatást.

Összeférhetetlenséggel kapcsolatos egyéb információk

Összeférhetetlenség, pl. allergiát okozó anyagok keresésekor, használat előtt tájékozódni kell az „Ingredients (INCI)” termékjelölésből. Ha bőrirritációk lépnek fel, kérjük, távolítsa el a terméket a leírtak szerint, és ha adott esetben forduljon orvoshoz.



Összetevők

Glicerin, hidroxietil-cellulóz, nátrium-benzoát, kálium-szorbát, citromsav



EXCLUSIVE DISTRIBUTION BY:
Internetmarketing Bielefeld GmbH,
Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Germany



CE