

Návod k použití Lubrikant Satisfyer Men – Neutral

Lubrikanty Satisfyer Men

Lubrikanty Satisfyer Men jsou zdravotnické prostředky určené k aplikaci na pokožku. Mají recepturu bez olejů a tuků a vyznačují se vybranými surovinami, kontrolovanými výrobními postupy a přísným testováním. Při testu lubrikantů na snášenlivost s pokožku a sliznicí byly zaznamenány pozitivní výsledky a lubrikanty jsou prokazatelně kompatibilní s kondomy.

Všechny lubrikanty z řady Satisfyer Men splňují přísné požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích a německého zákona o zdravotnických prostředcích.

Lubrikanty Satisfyer Men jsou na bázi vody. To znamená, že jsou snadno a beze zbytků omyvatelné vodou a nezanechávají lepavý pocit na pokožce. Jsou speciálně uzpůsobené pro použití se všemi výrobky Satisfyer Men, lze je však použít také s ostatními pomůckami nebo při pohlavním styku.

Jak lubrikanty účinkují

Tyto lubrikanty ti zaručí snadné a hladké použití tvého Satisfyeru Men. Fungují jako mazivo, které ti umožní rychle vniknout do měkkého pouzdra a naplno si vychutnat použití v kombinaci s tvojí oblíbenou pomůckou. Lubrikant ti zajistí realistický pocit a intenzivní lubrikaci. Jeho barevně a chuťově neutrální receptura je přitom zárukou přirozeného požitku.



Použití lubrikantů Satisfyer Men

Praktická lahvička umožňuje snadné dávkování. Nanes množství lubrikantu odpovídající velikosti burského oříšku na svůj penis a trochu také na pomůcku. Rozetři lubrikant rovnoměrně na ztopořený penis a vklouzni jemně do masturbátoru. Také při pohlavním styku nanes dostatečné množství lubrikantu na penis nebo na nasazený kondom i na intimní partii partnera a rozetři prsty. Doporučuje se umýt si před a po použití důkladně ruce. Při použití kondomu se bezpodmínečně řiď pokyny uvedenými v návodu k použití kondomu.



Odstranění lubrikantů Satisfyer Men

Lubrikanty z řady Satisfyer Men můžeš beze zbytků odstranit vodou, ať už přímo z pokožky a sliznic, nebo z pomůcky. Z hygienických důvodů doporučujeme pomůcku vyčistit před a po každém použití. K tomu se nejlépe hodí přípravek Satisfyer Men Disinfectant Spray.

Další informace o použití při pohlavním styku Antikoncepce a ochrana před infekcemi

U lubrikantů Satisfyer Men se nejedná o antikoncepční prostředky, lubrikanty neobsahují žádné spermicidní látky a neposkytují žádnou ochranu proti infekcím.

Při plánovaném početí

Gynekologové doporučují při touze po dětech používat lubrikanty jen v omezené míře nebo je pro jistotu nepoužívat vůbec, neboť mohou zkomplikovat početí.

Další informace pro případy nesnášenlivosti

Při zjišťování nesnášenlivostí, např. alergenů, doporučujeme před použitím zkontrolovat etiketu výrobku, konkrétně oddíl „Ingredients (INCI)“. Pokud se objeví podráždění pokožky, odstraň produkt podle uvedených pokynů a případně se porad s lékařem.



Obsažené látky

Voda, glycerin, hydroxyethylcelulóza, fenoxylethanol, allantoin, kyselina benzoová

Výrobce



Amor-Gummiwaren GmbH
August-Rost-Str. 4
99310 Arndtstadt, Německo



CE 0197