

## Návod na použitie Lubrikačný prostriedok Satisfyer Men – Cooling

### Lubrikačné prostriedky Satisfyer Men

Lubrikanty Satisfyer Men sú zdravotnícke prostriedky určené na použitie na koži. Majú zloženie bez olejov a tukov a vyznačujú sa vybranými surovinami, kontrolovanými výrobnými procesmi a rozsiahlym testovaním. Pri teste lubrikačných prostriedkov na znášanlivosť s pokožkou a sliznicami boli zaznamenané pozitívne výsledky a lubrikanty sú preukázateľne kompatibilné s kondómami.

Všetky lubrikačné prostriedky zo série Satisfyer Men spĺňajú prísne požiadavky európskej

„smernice 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach“ a nemeckého „zákona o zdravotníckych pomôckach“.

Lubrikačné prostriedky Satisfyer Men sú na báze vody. To znamená, že ich je možné jednoducho umyť vodou bez zanechania zvyškov a na koži nezanechávajú lepkavý pocit. Sú ideálne vhodné na použitie so všetkými výrobkami Satisfyer Men, taktiež je ich však možné použiť i s ostatnými pomôckami alebo pri pohlavnom styku.

### Pôsobenie lubrikačných prostriedkov

Lubrikačné prostriedky ti umožňujú jednoduché a hladké použitie tvojej pomôcky Satisfyer Men. Pôsobia ako mazivo, ktoré ti umožní rýchlo vniknúť do mäkkého puzdra a vychutnať si použitie v kombinácii s tvojou pomôckou. Lubrikačný prostriedok zabezpečí realistický pocit a intenzívnu klzavosť. Jeho farebne a chufovo neutrálné zloženie pritom umožňuje prirodzený pôžitok.



### Použitie lubrikačných prostriedkov Satisfyer Men

Praktická fľaštička ti umožňuje jednoduché dávkovanie. Nanes množstvo lubrikantu zodpovedajúce veľkosti arašidu na svoj penis a trochu taktiež na tvoju pomôcku. Lubrikačný prostriedok si rovnomerne rozotri na stoporený penis a jemne vkľzni do masturbátoru.

Aj pri pohlavnom styku nanes dostatok lubrikantu na penis alebo na kondóm nasadený na stoporenom penise ako aj na intímne partie partnera a rozotri ho prstami. Pred použitím a po ňom sa odporúča dôkladne si umyť ruky.

Pri použití kondómu sa bezpodmienečne riaď návodom na použitie kondómu.



### Odstránenie lubrikačných prostriedkov Satisfyer Men

Lubrikačné prostriedky od Satisfyer Men je možné bez zvyškov zmyť vodou, či už priamo z pokožky a slizníc alebo tvojej pomôcky. Z hygienických dôvodov je potrebné pomôcku vyčistiť pred každým použitím ako aj po ňom. Na to sa vynikajúco hodí dezinfekčný prípravok Satisfyer Men Disinfectant Spray.

### Ďalšie pokyny k použitiu pri pohlavnom styku

#### Antikoncepcia a ochrana pred infekciami

Lubrikanty Satisfyer Men nie sú prostriedky zabraňujúce počatiu, neobsahujú spermicídne látky a ani neposkytujú ochranu proti infekciám.

### Pokiaľ plánujete materstvo

Gyneológovia odporúčajú pri snahe splodiť dieťa používať lubrikanty len v obmedzenej miere alebo ich pre istotu nepoužívať vôbec, pretože môžu sťažovať počatie.

### Ďalšie pokyny pre prípady neznášanlivosti

Pri zisťovaní neznášanlivosti, napríklad alergénov, odporúčame pred použitím skontrolovať označenie výrobku, konkrétne „Ingredients (INCI):“. V prípade podráždení pokožky odstráňte výrobok podľa uvedených pokynov a prípadne sa poraďte s lekárom.



### Obsahové látky

Voda, glycerín, hydroxyetylcelulóza, fenoxyetanol, alantoin, kyselina benzoová, mentol, aróma

### Výrobca



Amor-Gummiwaren GmbH  
August-Rost-Str. 4  
99310 Arndtstadt, Nemecko



CE 0197