

# Satisfyer

## Használati utasítás Satisfyer – Gentle Light síkosítószer

### A Satisfyer síkosítószer

A Satisfyer síkosítószerek bőrön történő alkalmazásra való termékek. Olaj- és zsírmentes receptúra, kiváló síkosító tulajdonságokkal, hosszú távú hatással rendelkeznek.

A Satisfyer síkosítószer vízbázisú. Ez azt jelenti, hogy vízzel egyszerűen és maradéktalanul lemosható, nem okoz ragadós érzetet a bőrön. Ideális módon alkalmas minden Satisfyer termékhez, de minden egyéb játékhoz vagy szexuális együttléthez is használható.

### Így működnek a síkosítószerek

A síkosítószerek egyszerűvé és zavartalaná teszik a használatot a Satisfyerrel. A szilikon-rátát finoman csúszik az intim részeiden, így ideális pozicionálást tesz lehetővé számodra a maximális élvezet érdekében. A szintelen, íztelen és szagtalan receptúrájának köszönhetően semmi nem fogja elterelni a figyelmedet a legfontosabbról és teljes mértékben koncentrálni tudsz a végkifejletre.



### A Satisfyer síkosítószer alkalmazása

A praktikus flakon könnyű adagolást tesz lehetővé számodra. Cseppents egy kevés síkosítószert a csiklódra, és egy keveset a Satisfyer szilikonrátétra is. Oszlasd el a síkosítószert a kívánt testrészeken.

Nemi közösülés során szintén elegendő síkosítószert kell felvinni a testrészre, vagy a merev péniszre helyezett óvszerre, és az ujjakkal el kell oszlatni azt. Javasoljuk, hogy használat előtt és után alaposan mosson kezet.

Az óvszer használatakor elengedhetetlen az óvszer használati utasításában szereplő utasítások betartása.



### A Satisfyer síkosítószer eltávolítása

A Satisfyer sorozat síkosítószerei vízzel maradéktalanul lemoshatók, függetlenül attól, hogy bőrből, nyálkahártyából vagy a játékból származik-e. Higiénikus okokból tisztítsd meg a játékodat minden használat előtt és után. A Satisfyer Disinfectant Spray (fertőtlenítő spray) tökéletesen alkalmas erre.

### Egyéb tanácsok a nemi közösülés során történő használathoz Fogamzásgátlás és fertőzés elleni védelem

A Satisfyer síkosítószerek nem fogamzásgátlók, nem tartalmaznak sperma-semlegesítő hatóanyagokat, és nem biztosítanak fertőzésvédelmet.

### Gyermekvállalás esetén

A nőgyógyászok azt javasolják, hogy ha gyermeket szeretnénk, akkor csak takarékosan használjuk a síkosítószereket a biztonság érdekében, mivel azok megnehezíthetik a fogantatást.

### Összeférhetlenséggel kapcsolatos egyéb információk

Összeférhetlenség, pl. allergiát okozó anyagok keresésekor, használat előtt tájékozódni kell az „Ingredients (INCI)” termékjelölésből. Ha bőrirritáció lép fel, kérjük, távolítsa el a terméket a leírtak szerint, és ha adott esetben forduljon orvoshoz.



### Összetevők

Víz, glicerin, hidroxetil-cellulóz, nátrium-benzoát, kálium-szorbát, citromsav



### EXCLUSIVE DISTRIBUTION BY:

Internetmarketing Bielefeld GmbH,  
Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Germany

